

ご使用する前にお読みください

『商品名』：COVID-19 ANGEL・抗原検査キット（研究用）

『商品型番』：TK001

『商品内容』（1回分検査キット）：

- ① バッファー液入りチューブ×1
- ② 検体採取用綿棒×1
- ③ テストカード×1
- ④ 取扱説明書×1

操作ビデオ




同じ綿棒で両鼻孔のサンプルを採取する：
綿棒を鼻腔の2.5 cm（1インチ）まで挿入し、粘液や細胞の採取を確保できるように、鼻腔粘膜を5回こすり取る。サンプル採取が完了した後、直接にサンプルを処理することができます。


*注意事項：

1. サンプルを採取した後、できるだけ早く綿棒を処理すること。
2. 綿棒は室温、または、2-4℃で24時間保存できること。
3. 検査前に、綿棒と試薬キットを室温に戻すこと。
4. 使用する前に、説明書をよく読んでください。
5. 有効期限内にご使用ください。
6. サンプルを採取する時に、鼻の持病を持つ患者さんはご注意ください。
7. 濡れた手でテストカードを触らないで下さい、雑菌が付着する可能性があります。


操作方法の説明

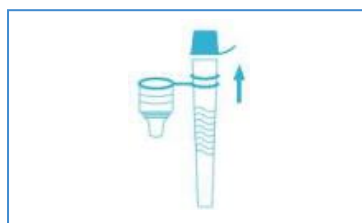

1、内容品を箱から取り出し、バッファー液入りチューブの蓋を開けます。中のバッファー液がこぼれないよう十分に注意してください。

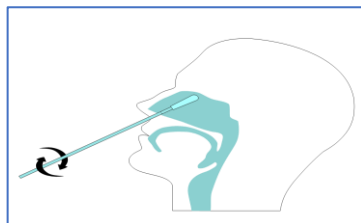

2、付属の滅菌綿棒を両鼻孔の奥まで徐々に挿入し、検体を採取します。十分な検体を採取できるように、左右4、5回回転して採取してください。

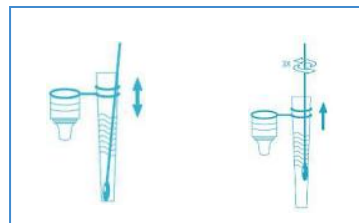


3、検体をバッファー液が入っているチューブに入れ、10～15回浸潤します。その後、チューブの両側を掴みながら、スワブ上の検体を中に残すように取り出します。



4、チューブをリッドで閉め、2回振ります。使用済みの綿棒を袋に戻し、テストカードを取り出します。




5、チューブを逆にし、検体をテストカード塗布の所に3滴垂らします。

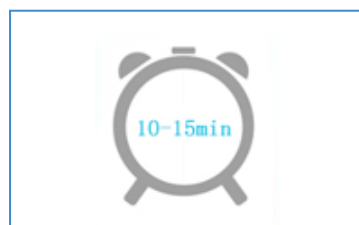

6、10分以上待てば結果判読ができます。15分以上長時間置いた後の結果には参考できません。

判読基準

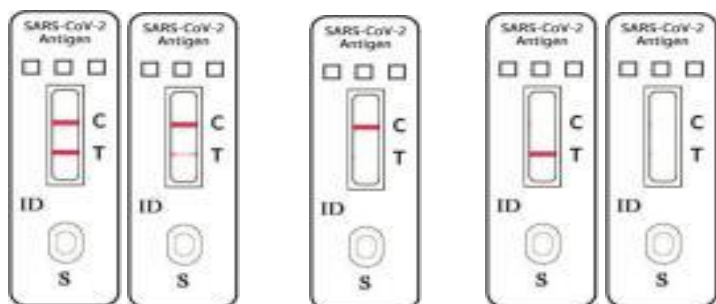

陽性

陰性

無効

使用上のご注意

- 1、ご使用の際には、説明書をよく読みいただき、ご使用される方のご自身の責任による自己採取のもと正しくご使用下さい。
- 2、本製品は、医薬品医療機器等法に基づく体外診断用医薬品ではなく、研究用試薬の為、診断目的では使用しないでください。
- 3、本製品を用いた検査判定はいかなる意味でも、医療診断や治療を目的とするものではないため、新型コロナウイルス感染を疑う症状がある方は、速やかに保健所、医療機関にご相談下さい。
- 4、本品は、使用の直前までパウチからカセットリーダを開封しないでください。
- 5、パウチが破損していたり、開いていた場合は使用しないでください。使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 6、検査デバイスは使い捨てです。
- 7、バッファー液は、防腐剤を含んでおり、皮膚や目に触れた場合は十分 amounts の水で洗い流してください。
- 8、万が一ビニール袋の外に触れた場合は、二重に入れて下さい。
- 9、ごみをビニール袋に入れた後は石鹸を使って、流水で手をよく洗って下さい。
- 10、各地域の廃棄方法のルールに従い、可燃ごみとして収集日にごみを出してください。
- 11、高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。