



ANGEL PREMIUM 抗原検査キット 【 Strep A & COVID-19 】

取扱説明書（研究用） 型番：TK010

内容物（1回分検査キット）

①テストデバイス×20

②バッファー入りチューブ×20

③検体採取用綿棒×20

④取扱説明書×1


取扱説明動画




操作方法

*注意事項：


- 1、本品は研究用試薬であり、それ以外の目的に使用しないでください。
- 2、使用期限を過ぎた試薬は、使用しないでください。
- 3、全ての検体は感染の危険性があるものとして、十分注意して取扱ってください。
- 4、テストデバイスの入ったアルミ袋に損傷のないことを確認し、使用時まで開封しないでください。
- 5、テストデバイスは、アルミ袋開封後、速やかに使用してください。
吸湿すると品質が劣化し、正確な結果が得られないことがあります。
- 6、テストデバイスは使い捨てです。再利用はできません。
- 7、テストデバイスの試料滴下部や判定部を直接手で触れないようにしてください。
- 8、判定は10分、または最大15分で判定してください。テストデバイスの乾燥により結果が変化することがありますので、20分を超えて結果を読み取らないでください。
- 9、バッファー液は、防腐剤を含んでおり、皮膚や目に触れた場合は十分量的の水で洗い流してください。
- 10、テストデバイスのコントロールラインが認められない場合は無効です。不適切な取り扱い、不正確な操作手順、またはテストデバイスの品質低下の可能性があります、別のテストデバイスを再検査し、テスト手順が正確に実施されていることを確認してください。
- 11、検体だけでなく、使用済の試薬全てが感染性廃棄物となります。廃棄物に関する規定に従い処理してください。

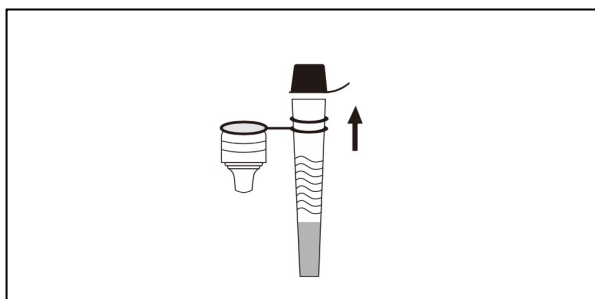


1、バッファー液入りチューブを取り出します。チューブ中のバッファー液がこぼれないよう十分に注意しながら、キャップを開けます。

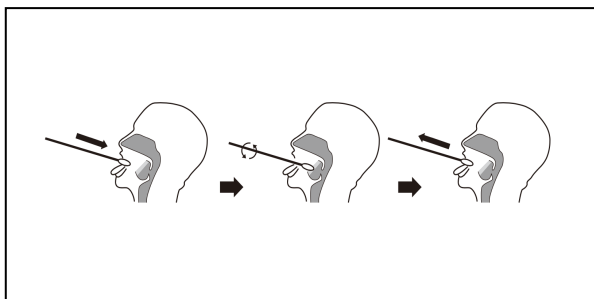


2、咽頭ぬぐい液採取方法：大きく口をあけ、口蓋、扁桃、咽頭後壁に綿棒（キット付属品）を強くこすりつけ、検体をていねいに採取します。この時綿棒が頬の内側、舌や歯に触れないように注意します。

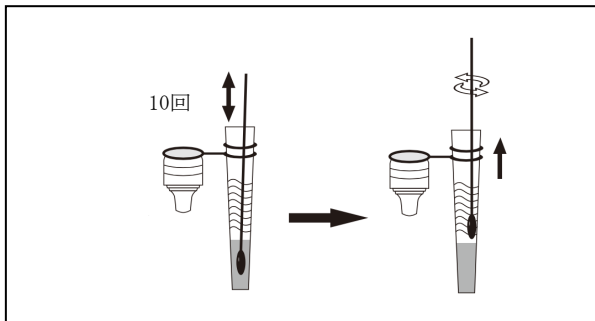


3、綿棒をチューブに入れます。綿部分をチューブの上からつまみ、かき混ぜるように動かします。最後に綿部分を絞るようにしながら引き抜き、綿棒を袋に戻します。

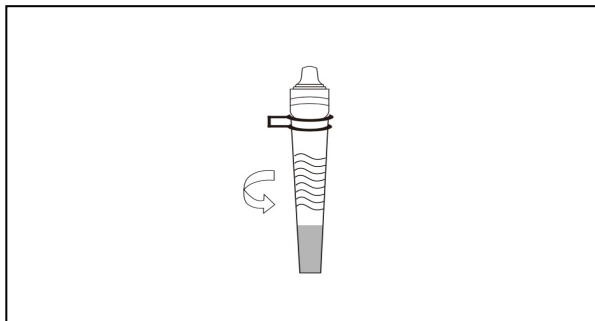

4、チューブの滴下用キャップを閉めます。


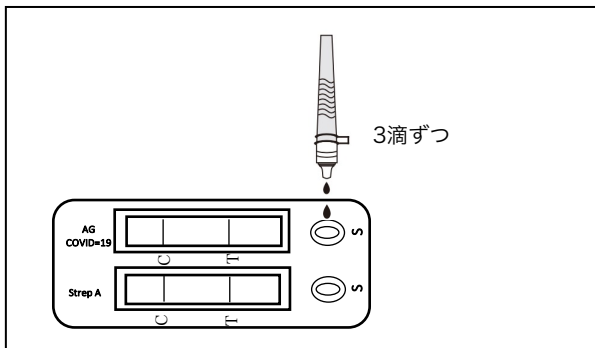


5、袋を開けテストデバイスを取り出し、水平場所に置きます。チューブ内の検体溶液を指定箇所に3滴ずつ垂らします。

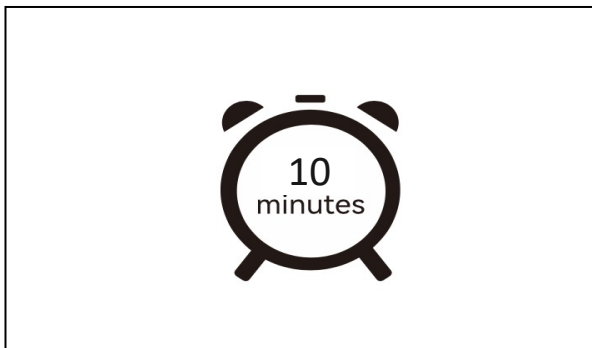

6、結果の判定には測定開始からは10分を要します。15分以上経過した結果は無効です。

結果判読

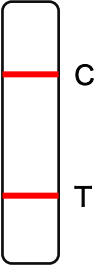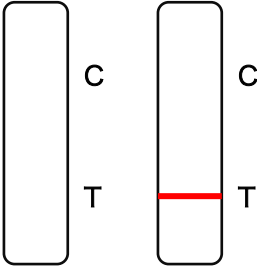COVID-19	Strep A	判定結果
		陽性： 判定部のコントロールライン（C）が発色し、テストライン（T）が発色した場合、陽性と判定します。 各テストラインの発色が薄い又は均一でない場合でも、陽性と判定してください。
		陰性： 判定部のコントロールライン（C）のみ発色し、テストライン（T）の所に発色がない場合、陰性と判定します。
		無効： テストラインの出現の有無に関わらず、判定部のコントロールライン（C）が認められない場合、測定は無効です。 サンプル量の不足、または操作が正しくない可能性があります。手順を確認し、別のテストデバイスで再検査を行ってください。

*本品は研究用試薬であり、それ以外の目的に使用しないでください。
感染の疑いがある場合は、最寄りの医療機関や研究センターで検査を行ってください。