



ANGELファースト 婦人用迅速検査キット【CA & TV & GV】

取扱説明書（研究用）

型番：TK020

内容物（20回分検査キット）

- ①テストデバイス×20 ②バッファー入りチューブ×20 ③検体採取用綿棒×20 ④取扱説明書×1

取扱説明動画



*注意事項:

1. 本製品は、外箱に表示された有効期限内にのみ使用してください。
2. 本検査は、カンジダ・アルビカンズ、トリコモナス・ヴァジナリス、ガードネラ由来のタンパク質検出専用であり、他のウイルスや病原体の検出には使用できません。
3. 検体の採取、保存は本使用説明書の指示に従って正確に実施してください。不適切な取扱いは誤判定の原因に繋がる可能性があります。
4. 本製品は研究用のみ使用されます。
5. 本製品は使い捨てです。再使用はしないでください。
6. 検体が汚染の疑いがある場合は、再度新しい検体を採取して検査を行ってください。
7. 凍結は不可です。
8. スwabによる検体採取が不適切な場合、偽陰性の結果となる可能性があります。
9. 必ずキットに同梱された検体採取用綿棒をご使用ください。
10. 検体採取後1時間以内に検査を完了してください。

*保管条件及び有効期間:



- ・ 4～30℃にて保管してください。凍結不可、遮光保存してください。
- ・ 有効期間は製造日より24か月です。製造日および有効期限は製品ラベルに記載されています。
- ・ 採取後、速やかに検査を行ってください。直ちに検査ができない場合、採取後2～8℃で、72時間以内保存可能です。長期保存が必要な場合は、-20℃で最長6か月間保存してください。

検査手順①

1、手を洗淨または消毒し、十分に乾燥させてから検査を開始してください。スwabの先端（採取部位）に直接触れないようにし、袋の最後部からスwabを取り出してください。

2、滅菌済みスwabを使用し、膈内に挿入して分泌物を採取してください。可能な限り後穹窿部から採取するようにしてください。


3、十分な検体を得るために、採取部位でスwabを左右5回回転してください。採取後は速やかに検査を行ってください。

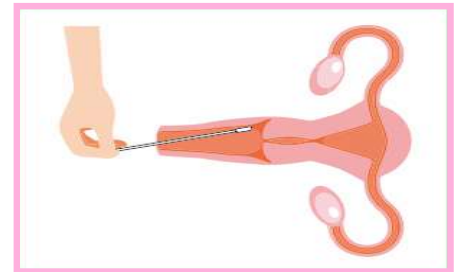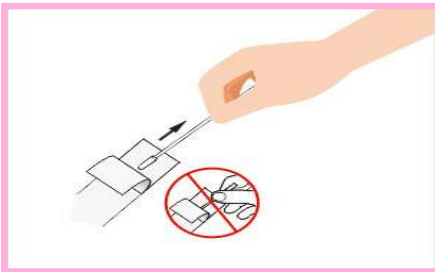


検査手順②

下の図に従って操作してください

1. 検査前に、テストデバイス、バッファー入りチューブおよび検体採取用綿棒を室温（10～30℃）に戻してください。
2. バッファー液入りのチューブの上部にあるフィルムを剥がしてください。
3. 検体採取後綿棒を抽出し、バッファー入りのチューブに挿入して15秒以上、かき混ぜて下さい。
4. チューブを指で押さえながら、スwabを回転させつつ、取り出してスwab中の液体をしっかりと絞り出してください
5. チューブの滴下用キャップを閉めます
6. テストデバイスをパウチから取り出します。
7. バッファー液入りチューブを逆さまにして、各テストデバイスの注入口（S）に3滴ずつ垂らしてください
8. 判定時間：検体滴下後15分で結果を判定してください。20分以降の判定結果は無効となります。

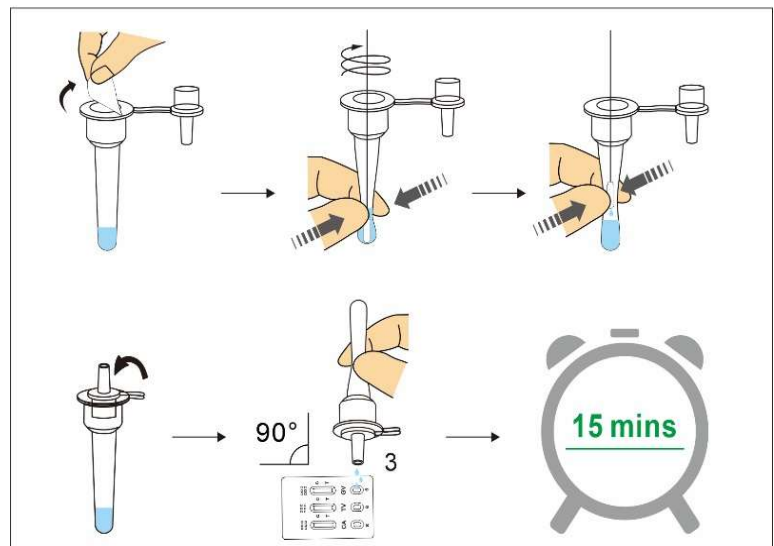


結果判読

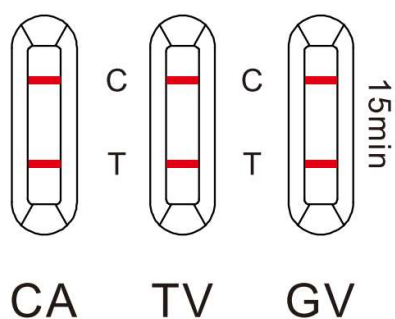

陽性：

※ 「S」マークのある穴がバッファの注入口です。

コントロールライン(C)とテストライン(T)に赤色のラインがそれぞれ出現します。

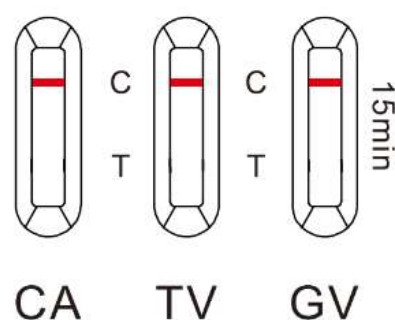


陰性：

Cラインのみに赤色のラインが出現し、Tラインには何も表示されません。

この場合、検体中にカンジダ・アルビカンズ、トリコモナス・ヴァジナリス、 gardnerella 抗原が存在しないか、または検出限界未満であることを示しています。

結果に疑いがある場合は、1～2日後に再検査を行ってください。

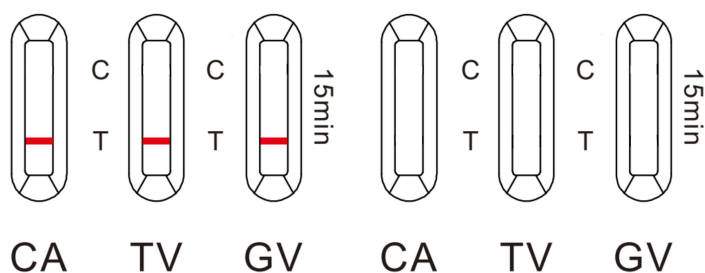

無効：

Cラインに赤色のラインが出現しない場合は、検査手順の誤りなどが考えられます。再検査を行ってください。

*本商品は医療診断や治療のために使用することはできません。
疑いがある場合は、最寄りの医療機関や研究センターで検査を行ってください。